


 ant+carespot
Quick Guide

Meet ANT

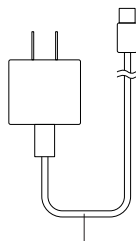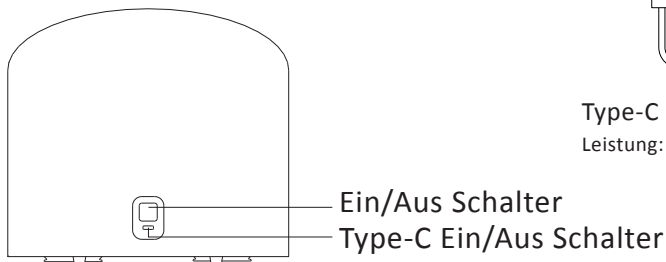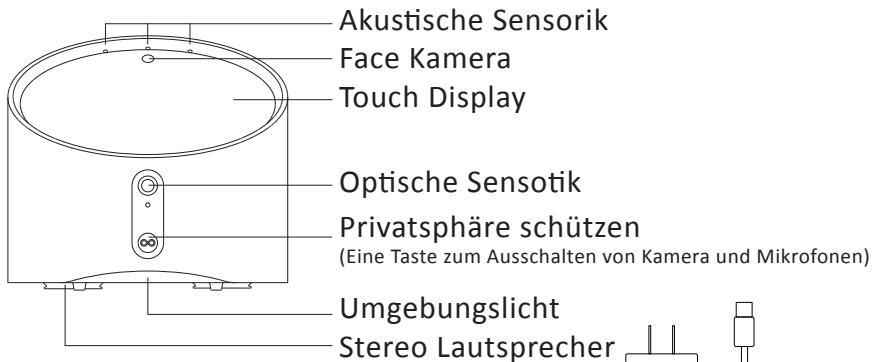

Type-C Netzteil

Leistung: 5V = Max 3A

ANT zuhause nutzen

Such dir einen Ort aus, wo Dein CareSpot praktisch platziert ist und Du ihn gut bedienen kannst.

Wohnzimmer



Schlafzimmer




Küche





ANT einschlaten

Der ANT CareSpot startet automatisch, wenn Du das Gerät an das Stromnetz anschließt. Dazu benutzt Du bitte ausschließlich das Original-Netzteil!

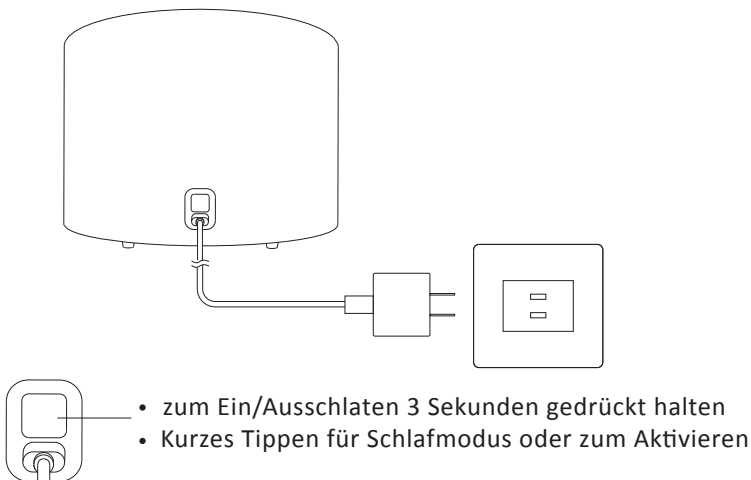


Nutzung einer SIM-Karte


Plaziere eine SIM-Karte in den vorgesehenen Schlitz, bevor Du das Gerät startest und an den Strom anschliesst.

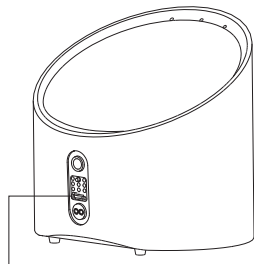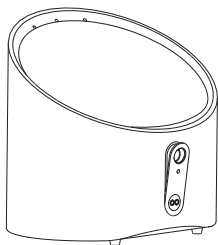

- 1** Zum Öffnen hier unter dem Knopf drücken

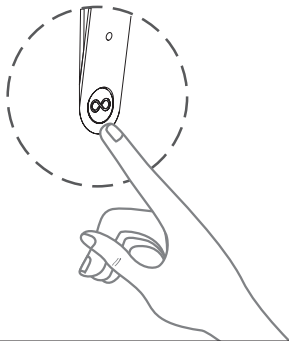


- 2** Der obere Schlitz ist für eine SD Speicherkarte, der untere Schlitz ist für eine SIM-Karte (Kontaktfläche nach oben)

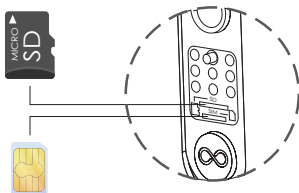

Verbindung mit dem Internet

Wenn Du ANT mit einer SIM-Karte nutzt, kannst Du die Schritte überspringen. Die Verbindung über Dein WiFi Netz zum Internet wird über dem Kontroll-Schieber eingestellt (von Oben nach Unten herunterwischen)

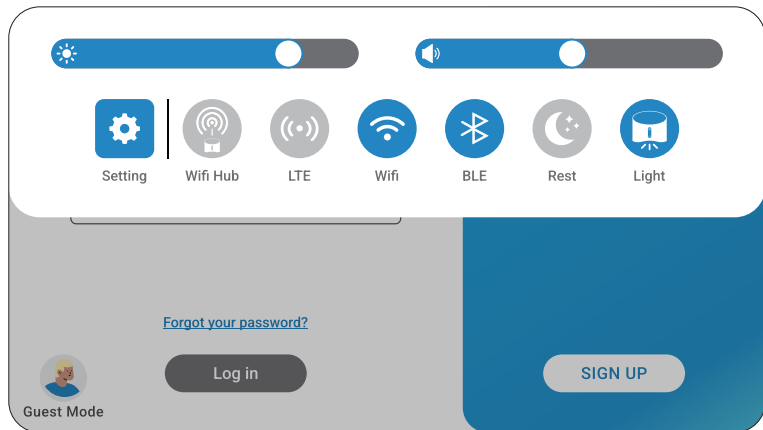

Registrierung als ANT Nutzer

Falls Du schon vorab als Nutzer der ANT eingecheckt bist, kannst Du gleich loslegen. Ansonsten legst Du einfach ein neues Profil an mit Namen, E-Mail und einem Passwort.


Welcome Back



To keep connected with us, please log in your personal info.

LOG IN

Create an account

Name Last Name


 Email

 Password 

SIGN UP

My Profile

SAVE



Name * Last Name * Gender *

Email * Phone * Birth Date *

Height Weight BMI

Allergies Drug Intolerance How is your mobility?

ANT-Anwendungen

Dein ANT CareSpot ist Dein Begleiter für Deine Gesundheit zuhause. Die ANT kann auch mit Deiner Familie und Helfern befreundet sein. So hilft Dir ANT in Kontakt zu bleiben. Video-Calls, Intercom, Memos und sogar eine SOS Funktion bieten vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Situationen. Deine Kontakte sind links (rot) zu finden, In der Mitte (blau) werden die Vitalparameter gesammelt und rechts (gelb) gehts zur Entspannung mit Musik.




Die ANT CareGiver App

Die mobile App für alle Angehörigen und Freunde des ANT Nutzers ist im AppStore und bei GooglePlay verfügbar.




WiFi Verbindung herstellen


- 1 Von Oben nach Unten herunterwischen, um auf den Kontroll-Panel zu gelangen.

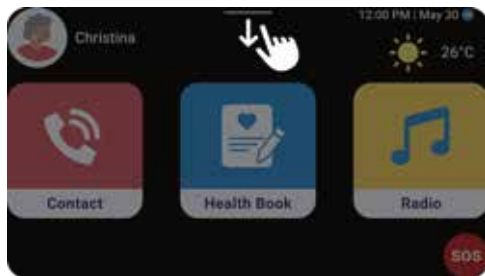

- 2 Long press on the WiFi icon in the control panel to enter the settings page.

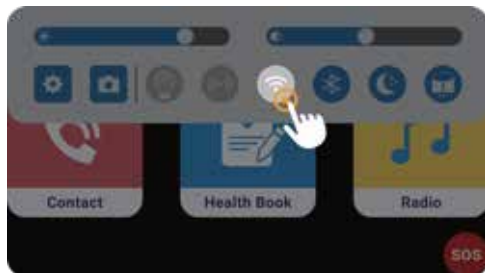


Notfall-Kontakt bestimmen


- 1 Auf das Nutzer Profilbild tippen  und das Profil öffnen.
- 2 Im Menü rechts oben findet man die Funktion zum Bearbeiten des Profils.



- 3 Unten lässt sich die virtuelle SOS-Funktion aktivieren. Die entsprechenden Kontakte können auf Karten gespeichert werden.

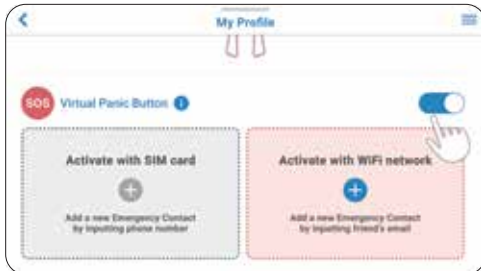

Einstellung der ANT-Funktionen und Parameter

- 1 Auf das Nutzer Profilbild tippen  und das Profil öffnen.
- 2 Im Menü rechts oben findet man das Menü für die ANT-Einstellungen.



- 3 Unter Dashboard kannst Du bestimmen ob Du eine einfache oder fortgeschrittene Benutzeroberfläche verwenden möchtest.




Verbindung mit medizinischen Geräten über HealthBook

Wenn Dein medizinisches Gerät mit ANT verbunden werden kann, ist es im HealthBook automatisch zu finden, sobald es eingeschaltet ist oder eine Messung erfolgt ist. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth. Andernfalls können die Werte manuell im HealthBook eingetragen werden.

1




2

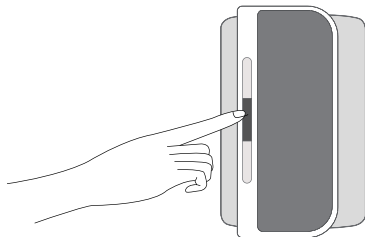

Wissenswert!

Die Sensorik des ANT CareSpot ist primär aktiviert, damit der Nutzer die größtmögliche Sicherheit genießt und erreichbar ist. Dann ist das Infinity-Zeichen erleuchtet. Der Privacy Button erlaubt es die Privatsphäre zu erweitern. Dann erlischt das Infinity Symbol und Raum-Kamera und Mikrophone sind ausgeschaltet.

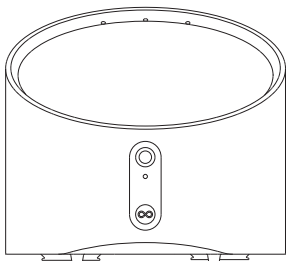

Licht leuchtet
Volle Funktionalität;
Kamera und
Mikrophone sind aktiv.



Licht aus
Privatsphäre an;
Kamera und
Mikrophone aus.




Mit Drücken des Knopfes jederzeit direkt umzustellen: zwischen voller Funktionalität oder maximaler Privatsphäre wählen



Neustart

Falls der ANT CareSpot nicht startet, das Netzteil mit der ANT verbinden, ggf. etwas warten und sonst 15 Sekunden den Power-Knopf für einen Neustart hinten gedrückt halten.

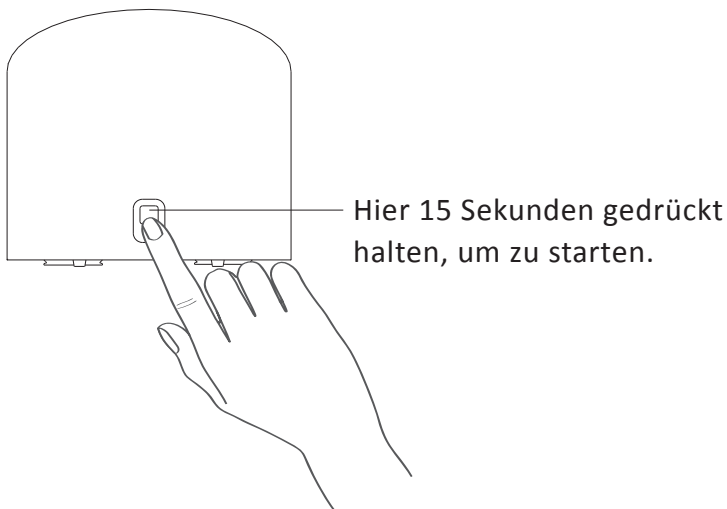

Model : ANT CareSpot

IMEI :

Date :



Design in Germany
corbit GmbH
Brühlstraße 19, 30169 Hannover
01515 6521429